

Instrument zu entfernen (Sonde, Aufwachsinstrument oder Schaber). Darauf achten, den Interproximalbereich mit der Sonde zu bearbeiten, um interproximalen Zement zu entfernen. Mit Zahnseide nacharbeiten.

6) Nach etwa 3 Minuten erreicht der Zement seine Endhärte.

7) Falls die Krone abgenommen und neu zementiert werden soll, *SensiTemp*<sup>®</sup> NEZO mit einem scharfen Instrument oder einem kleinen runden Bohrer aus dem Kroneninnenraum entfernen.

## SensiTemp<sup>®</sup> NEZO Cemento Provisional

**Indicaciones de uso**

*SensiTemp*<sup>®</sup> NEZO Cemento Provisional está indicado en la cementación provisional (reversible) de coronas, empastes, recubrimientos y puentes dentales provisionales.

**Contraindicaciones**

*SensiTemp*<sup>®</sup> NEZO Cemento Provisional está contraindicado en la cementación permanente de una restauración dental fija.

**Advertencias**

*SensiTemp*<sup>®</sup> NEZO no deberá usarse con pacientes con sensibilidad a cualquiera de los componentes.

**Precauciones**

Siga las instrucciones de uso. No use este producto después de la fecha de caducidad. Para evitar la irritación del tejido, retire cuidadosamente el exceso de material tras la cementación.

**Reacciones adversas**

No use este producto con pacientes que tengan o se sospeche que tengan sensibilidad o alergia a cualquiera de los ingredientes.

**Modo de empleo**

*Jeringa de 5 ml - Primer uso - Funcionamiento de la jeringa*

- Retire el capuchón marrón de protección y deséchelo.
- Empuje suavemente el émbolo y extraiga una pequeña cantidad de cemento, asegurándose de que el material sale por igual de los dos orificios de la jeringa. Límpielo con cuidado.
- Coloque una punta de mezcla en la jeringa y gire en dirección de las aguas del reloj 1/4 de vuelta para bloquearla en su sitio.
- Presione el émbolo para extraer cemento por la punta de mezcla. Deseche la primera presión del tamaño de un guisante.

La jeringa ya puede suministrar el cemento directamente a la corona. Después de usarla, deje la punta de mezcla puesta hasta la próxima vez que tenga que usarla. En los usos posteriores no será necesario volver a purgar la jeringa. Sin embargo, para obtener mejores resultados recomendamos limpiar cualquier material que haya quedado en el orificio de la jeringa antes de colocar una punta de mezcla nueva.

*Cartucho de 25 ml – Primer uso – Funcionamiento del cartucho*

- Cargue el cartucho en la pistola dosificadora asegurándose de que el cartucho quede completamente encajado en el dispensador y el pasador de cierre totalmente acoplado.
- Quite la tapa azul de protección del cartucho y deséchela.
- Empuje el émbolo negro en la pistola dosificadora de manera que quede ajustado contra los pistones del cartucho.
- Apriete el gatillo de la pistola dosificadora para obtener una pequeña cantidad de material del cartucho, asegurándose de que el material sale por igual por los dos lados. Limpie con un pañuelo de papel los orificios del cartucho y deseche el material sobrante.
- Coloque la punta de mezcla apropiada (de 3,2 mm de color azul claro) en el cartucho alineando la muesca de la punta con la muesca del cartucho. Asegúrese de que la punta está bien ajustada y gire el eje azul de la punta 1/4 de vuelta para que quede bloqueado en su sitio.
- Apriete el gatillo de la pistola dosificadora para extraer el cemento provisional. Deseche la primera cantidad de material del tamaño de un guisante que sale por la punta de mezcla.

El cartucho ya puede aplicar el cemento directamente a la corona. Después de usarla, deje la punta de mezcla puesta hasta la próxima vez que vaya a usarla. En los usos posteriores no será necesario volver purgar el cartucho. Sin embargo, para obtener mejores resultados recomendamos limpiar cualquier material que haya quedado en el orificio del cartucho antes de colocar una punta de mezcla nueva.

**Cementar una restauración**

- Asegúrese de que la restauración temporal está bien ajustada, pulida (o recubierta con una capa de barniz GlossCote<sup>®</sup>), y que el interior está limpio y seco.

2) Aisle y seque el diente preparado.

- Monte una nueva punta de mezcla en la jeringa o cartucho de cemento provisional *SensiTemp*<sup>®</sup> NEZO y coloque cemento en la corona. Mantenga la punta en el cemento para evitar la formación de burbujas de aire. Asegúrese de que el interior de la corona está recubierto de cemento pero no lo sobrecargue. Esto se puede conseguir rellenando superficialmente la corona provisional y usando la punta de la jeringa/cartucho para levantar el cemento provisional *SensiTemp*<sup>®</sup> NEZO y cubrir los márgenes. Empiece a cronometrar.
- Ajuste la corona y pida al paciente que la mantenga en su lugar mordiendo un trozo de algodón.
- Transcurridos unos 90 segundos, retire el material sobrante con un instrumento (sonda, explorador o escariador). Asegúrese de pasar la sonda de forma interproximal para eliminar cualquier cemento interproximal, seguido de la seda dental.
- El cemento final queda fijado tras unos 3 minutos.
- Si es necesario retirar la corona y volver a cementar, deberá eliminarse el cemento provisional *SensiTemp*<sup>®</sup> NEZO solidificado del interior de la corona utilizando un instrumento afilado o una fresa redonda pequeña.



Sultan Healthcare

1301 Smile Way • York, PA 17404-0807 • USA
Toll Free: 800-637-8582 • Phone: 201-871-1232
Fax: 201-871-0321 • www.sultanhealthcare.com

**EC REP** MDSS GmbH • Schiffgraben 41 • 30175 Hannover, Germany



<p>REF 70050, 70055</p>
<p><b>SensiTemp<sup>®</sup> NEZO: Temporary Cement</b></p> <p>Indications For Use</p>

<p><b>SensiTemp<sup>®</sup> NEZO: Ciment Temporaire</b></p> <p>Indications</p>
--

<p><b>SensiTemp<sup>®</sup> NEZO: Cemento Provvisorio</b></p> <p>Indicazioni per l’uso</p>
--

<p><b>SensiTemp<sup>®</sup> NEZO: Provisorienzement</b></p> <p>Indikationen</p>
---

<p><b>SensiTemp<sup>®</sup> NEZO: Cemento Provisional</b></p> <p>Indicaciones de uso</p>
--

